


## Zusammenbauanleitung für SONO MN Schutzmasken

Die SONO MN-Maske besteht aus dem Filtermedium, der Nasenklammer und Gummibändern. Diese sind im Karton separat verpackt und müssen pro Maske jeweils einzeln entnommen werden. Aktuell müssen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von beschnittenen Gummibändern auch Rollen mit Gummiband ausgeliefert werden. In Kürze werden Bänder, passender Länge beigelegt. Bis dahin: **Schneiden Sie 2 Bänder mit einer empfohlenen Länge von 30 cm von der Rolle ab.** Ansonsten entnehmen Sie 2 Bänder mit je 30 cm Länge.

**Wichtig: Die noppige Oberfläche muss vom Gesicht abgewandt sein. Beim Aufsetzen muss die Kennzeichnung FACE (Gesicht) vom Nutzer lesbar (nicht spiegelverkehrt) sein.**

1. Vor dem Zusammenbau sind die Hände gründlich zu waschen und zu trocknen.
2. Untersuchung der Maske auf etwaige Schäden
3. Zusammenbau der Maske nach folgendem Schema:
4. Nasenklammer aufkleben, oben mittig im verprägten Bereich
5. Falten Sie die Maske an den 8 Falzhilfen so, dass jeweils 3 Lagen und Löcher übereinander liegen und das Gummiband durch 3 Löcher (Kreuzschlitze) gleichzeitig gezogen werden kann.

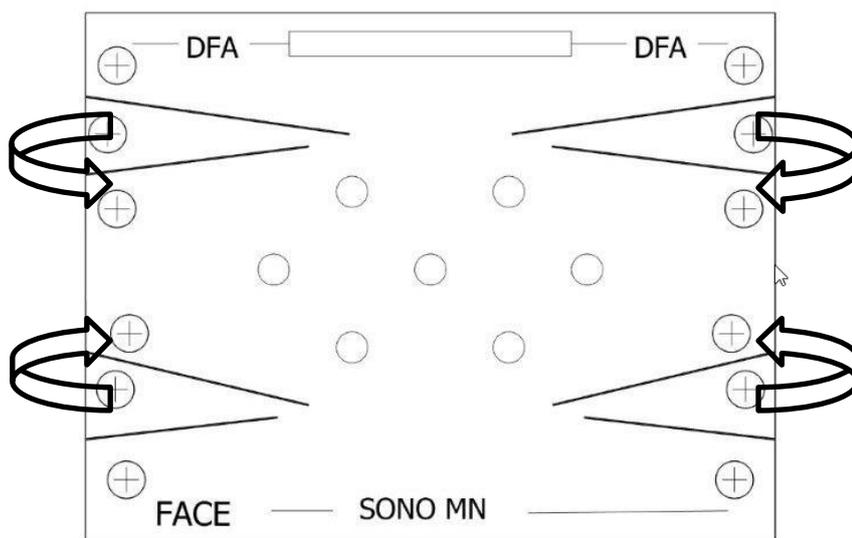

Danach sollte die Faltung so aussehen:



Die genaue Lage der Knoten sollten Ihren individuellen Gesichtsmaßen angepasst werden. Wir empfehlen die Fixierung der Maske hinter den Ohren.

Laufende Optimierungen: Die Steifigkeit der Nasenklammer wird verbessert, sobald steiferes Material in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Eine Video-Anleitung finden Sie unter:

[https://www.dfabielefeld.de/download/Anleitung\\_zum\\_Gebrauch\\_sono\\_MN.mp4](https://www.dfabielefeld.de/download/Anleitung_zum_Gebrauch_sono_MN.mp4)

Das Datenblatt finden Sie auf unserer Homepage unter:

[http://www.dfabielefeld.de/fileadmin/user\\_upload/sono\\_MN/Sonozorb\\_M-N\\_TDS\\_03-2020.pdf](http://www.dfabielefeld.de/fileadmin/user_upload/sono_MN/Sonozorb_M-N_TDS_03-2020.pdf)

Bielefeld, 02.04.2020

Dr. Freist Automotive Bielefeld GmbH  
Ernst-Graebe-Str. 10  
33611 Bielefeld  
Telefon: + 49 521 5240-469  
Telefax: + 49 521 5240-442

Geschäftsführer:  
Dr. Christoph Freist  
Dr. Ralf Dopheide  
Bernd Wahner

Sitz: Bielefeld  
Handelsregister Bielefeld  
HRB 39951  
Steuer-Nr. 305/5815/1864  
UST-ID-Nr. DE815176109

Bankhaus Lampe  
Konto-Nr. 418358  
BLZ 48020151  
IBAN: DE79480201510000418358  
SWIFT CODE: LAMPDEDDXXX